

# SARS-CoV-2

## Antigen Self Test Nasal

Hitri referenčni vodnik za paciente

Ta navodila služijo kot referenca za uporabo testa

### SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal.

Ključnega pomena je, da preberete navodila za uporabo za paciente, preden uporabite ta test.

IVD

CE

0123


## Pomembne varnostne informacije

### ⚠ Opozorilo!


- Pred in po izvedbi testa si roke si umijte z milom in vodo ali uporabite razkužilo za roke.
- Bris ohranjajte čist. Izogibajte se dotikanju konice brisa in zagotovite, da ta pred uporabo ne pride v stik s katero koli površino.
- Testni komplet uporabite samo enkrat.
- Izogibajte se stiku s kožo in očmi. V primeru nenamernega stika dobro izperite, da se izognete draženju kože. V primeru dvoma se posvetujte z zdravnikom. V primeru razlitja zagotovite temeljito čiščenje z uporabo ustreznega razkužila.
- Nobenih sestavnih delov testa, razen brisa, ki je vključen v komplet, ni dovoljeno uporabljati v telesu. Ne pogoltnite nobenega sestavnega dela.

## Sestavni deli testnega kompleta

Vrečka **1** vsebuje testni pripomoček in paket sušilnega sredstva (x5)

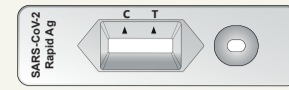


Vrečka **2** vsebuje 5 cevok s tekočino in 5 pokrovčkov s šobo (x1)

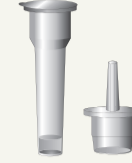

Sterilni bris



Držalo cevke

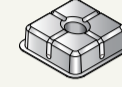

Materiali, ki so potrebni, vendar niso priloženi:


- Časovnik
- Robček

## 1 Priprava na test

1. Skrbno preberite navodila za uporabo za paciente za test **SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal**.
2. Roke si umijte z milom in vodo ali uporabite razkužilo za roke, preden uporabite test.




3. Preverite rok trajanja ⏰ na hrbtni strani folijskih vrečk. Ne uporabljajte testa, če je rok trajanja potekel.

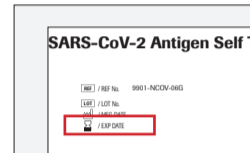


4. Odprite eno od folijskih vrečk **1**, tako da jo strgate vzdolž perforirane linije in odstranite testni pripomoček ter paket sušilnega sredstva.

5. Zagotovite, da je testni pripomoček nedotaknjen in da v paketu sušilnega sredstva ni zelenih kroglic. Ne odpirajte paketa sušilnega sredstva.

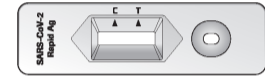


## 2 Odzvem in priprava vzorca iz nosu

1. Odprite folijsko vrečko **2**, tako da jo strgate vzdolž perforirane linije in odstranite eno od cevok s tekočino ter en pokrovček s šobo in ju položite na mizo.
2. Previdno odprite tesnilo cevke brez razlivanja tekočine znotraj cevke. Cevko namestite v držalo cevke.

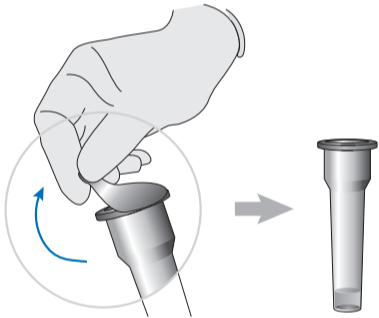


3. Z robčkom si obrišite nos.
4. Odstranite bris iz embalaže. Zagotovite, da se dotikate samo ročaja brisa in ne mehke blazinice na konici.

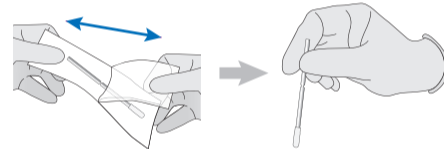


5. Glavo rahlo nagnite nazaj.
6. Bris z mehko blazinico naprej vstavite v vašo levo nosnico. Počasi potisnite bris pribl. 2 cm naprej (vzporedno z nebom vaših ust - ne navzgor), dokler ne naletite na upor. Ne pritiskajte.

7. Bris 4-krat zavrtite (za pribl. 15 sekund) ob sluznico nosne stene, preden ga odstranite iz nosnice.
8. Ponovite koraka 6 in 7 v vaši desni nosnici, z uporabo istega brisa.  
**Opomba:** Vzorce je treba odvzeti iz obeh nosnic z istim brisom.

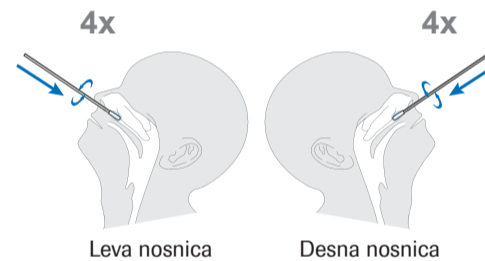


9. Bris vstavite v cevko, dokler se mehka blazinica ne nahaja v tekočini. Stisnite cevko v spodnjem delu in jo trdno zadržite. Več kot 10-krat premešajte bris, da biološki material prenesete iz blazinice v tekočino.
10. Bris odstranite med stiskanjem strani cevke, da iz brisa iztisnete tekočino. Odstranite blazinico in varno zatesnite cevko s pokrovčkom s šobo.

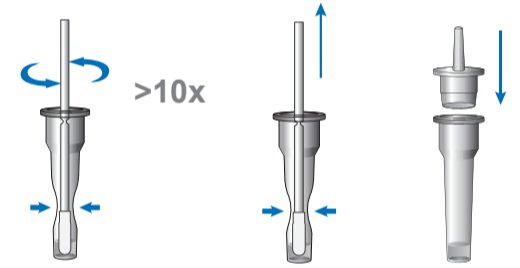

**OPOZORILO!** Če cevke ne stisnete, lahko to povzroči nepravilne rezultate zaradi odvečnega pufru v brisu.

## 3 Izvedba testa

1. Testni pripomoček namestite na ravno površino.
2. Cevko držite pokončno nad okroglo odprtino, označeno na spodnji sliki (ne nad pravokotnim okencem za rezultate).

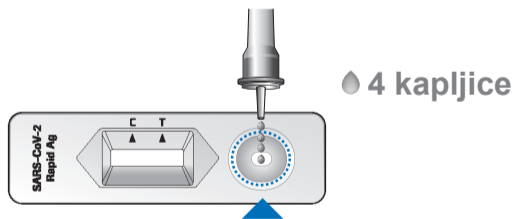

3. V okroglo odprtino nanesite natančno 4 kapljice. Po potrebi nežno stisnite strani cevke.  
**Opomba:** S testom lahko nadaljujete tudi če pomota na testni pripomoček nanesete 5 kapljic.

4. Nastavite časovnik in rezultate testa odčitajte pod 15 do 30 minutah.


**OPOZORILO!** Rezultati testa, ki so odčitani **pred 15 minutami in za 30 minutami** bodo morda nepravilni.



5. Po izvedbi testa si roke si umijte z milom in vodo ali uporabite razkužilo za roke.

## 4 Interpretacija rezultatov


### Neveljaven rezultat testa

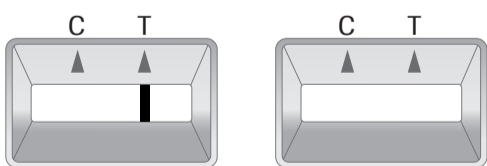

1. Če kontrolna vrstica (C) ni vidna, potem je potrebno rezultat smatrati kot neveljaven. Test ne deluje pravilno in izvesti morate drug test z uporabo drugega testnega kompleta.

Morda ste nepravilno izvedli test. Skrbno preberite navodila za uporabo in ponovite test. Če je vaš rezultat testa še vedno neveljaven, se obrnite na vašega zdravnika ali testni center za COVID-19.

### Pozitiven rezultat testa

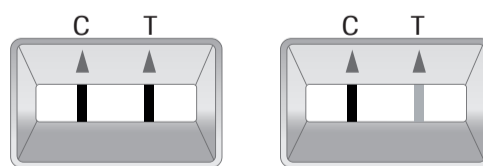


2. Če je testna vrstica (T) vidna skupaj s kontrolno vrstico (C), potem to pomeni, da je test pozitiven.

Skrbno si oglejte rezultat: Test je potrebno smatrati kot pozitiven, če sta vidni dve vrstici - tudi če sta zbledeli.

Pozitiven test pomeni, da obstaja velika verjetnost, da imate COVID-19. Takoj se obrnite na vašega osebnega zdravnika/primarnega zdravnika ali vaš lokalni zdravstveni organ ter upoštevajte lokalne smernice za samoizolacijo. Vaš zdravnik vas bo morda moral za potrditev rezultata poslati na PCR-test.

### Negativen rezultat testa

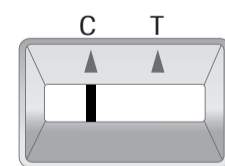

3. Če je vidna kontrolna vrstica (C) (ne glede na to kako zbledela je) in testna vrstica (T) ni vidna, potem to pomeni, da je test negativen. Malo verjetno je, da imate COVID-19.

Vendar, tudi če je vaš test negativen, še naprej upoštevajte vse higienske in varnostne ukrepe. Če sumite, da ste okuženi (tj. če imate prisotne simptome ali se ti simptomi slabšajo), se obrnite na osebnega zdravnika/primarnega zdravnika. Morda imate kakšno drugo okužbo oz. je lahko vaš rezultat testa lažen. Test lahko ponovite po 1-2 dneh, saj COVID-19 ni mogoče povsem natančno odkriti v vseh fazah okužbe.

SD Biosensor, Inc.  
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,  
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,  
REPUBLIC OF KOREA  
Izdelano v Južni Koreji

EC REP Pooblašeni predstavnik:  
MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
D-66386 St. Ingbert, Germany

Distribuirna:  
Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
D-68305 Mannheim, Germany  
www.roche.com

Različica dokumenta: Prvotna različica

Datum spremembe: April 2021

© 2021. Vse pravice pridržane.

Izdelek je namenjen samostestiranju.

MC-SI-00210

0 09437916001 (01) 2021-04 SL